

kx2500 er en digital promilletester med bransjeledende nøyaktighet. Den avanserte prøvetakingsteknologien måler raskt alkoholmengden i pusten din. Det unike SMARTLED LCD-systemet indikerer promille-nivået med både numerisk verdi og en varselampe for enkel avlesing.

Pakkens innhold:

- kx2500 Promilletester
- 3 munnstykker
- Norsk brukerveiledning

Komme i gang

Press ned batterideksel ved å trykke forsiktig på baksiden av enheten. Trykk ned og dra dekslet vekk fra enheten. Installer 2 stk AA ALKALINE-batterier og lukk batteridekslet.

Bruk

Munnstykke: Trekk ut det sammenleggbare munnstykket til venstre på apparatet. Ved testing av flere personer, fest nytt munnstykke om nødvendig.



Slå på: Trykk på Power-knappen for å slå på enheten. Enheten vil initialisere sensoroppstart og automatisk rengjøringsprosess. Tidsuret vil telle ned fra 99.




KLAR: Vent til "Rdy" (Klar) vises på skjermen, og du hører et enkelt pip. Dette indikerer at enheten er klar til bruk.



BLÅSING: Blås JEVNT gjennom munnstykket i 5 sekunder til du hører pipefyden som signaliserer at testen er fullført. Enheten vil analysere prøven og vise målt BAC-nivå på LCD-skjermen.

Omtest: Skru av enheten og skru den på igjen for å teste på nytt. Det er anbefalt å vente minst 1 minutt for å få et perfekt resultat.

Varslingssystem

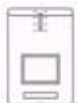

SMARTLED alert: LED-lyset på toppen av måleren blinker når promillen er over 0,5‰. Dette fungerer som en kjapp advarsel for brukeren.

System-meldinger

Display	Forklaring og løsning
	Gjenta trinnene for bruk.
	Denne meldingen betyr at sensor ikke er klar (Sn) og at enheten trenger en ny oppstart (for automatisk rengjøring). Gjenta trinnene under "Bruk".
	Denne meldingen vises når enheten avdekker et veldig høyt alkoholnivå (over 4‰).
	Denne meldingen vises hvis sensor er skadet. Ta kontakt med TT Micro på tlf 22 74 88 40 eller www.ttmicro.no
	Denne meldingen vises når batteriet er lavt. Sett inn to nye AA-batterier.

Forholdsregler

1. Vent alltid i minst 20 minutter før du tester deg etter at du har drukket, spist eller røkt.
2. Unngå testing i sterk vind eller i lukket rom med dårlig luft.
3. Når batterisymbolet vises, bør batteriet skiftes.
4. Selv om promilletesteren analyserer alkoholkonsentrasjonen i blodet svært presist, skal ikke måleren benyttes som et verktøy til å vurdere bilkjøring.
5. Ved normal bruk bør alkotesteren omkalibreres etter 6 - 12 måneder, eller etter 300 målinger, for å sikre et presist resultat.

Spesifikasjoner

Dimensjon	120 x 42 x 18mm
Vekt	99 gram inkl. batterier.
Batteri	2 stk AA/LR6 (ikke inkl.)
Sensor	Semi Conductor Teknologi
Oppvarmingstid	20-60 sekunder
Brukstemperatur	10-40°C
Presisjonsnivå	±0,10 ‰BAC eller ±0,01BAC eller ±0,05mg/L ved cal. punkt

Garanti og juridisk

Produsenten garanterer for produktet i 2 år fra kjøpsdato. Garantien dekker produksjonsfeil eller materialfeil (unntatt kalibrering) som måtte oppstå ved normal bruk. Produsenten forplikter seg til å erstatte eller reparere produktet forutsatt at det returneres med kvittering. Garantien gjelder ikke dersom produktet er åpnet eller forsøkt reparert. Service/-reklamasjon i Norge: TT Micro AS, tlf: +47 2274 8840. www.ttmicro.no

Juridisk informasjon

Produsent, distributører, forhandlere, agenter, m.fl., kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av eventuelle feil ved måleresultatet og fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap som følge av feil måleresultat eller feil bruk. Føreren har selv ansvaret for at bilkjøring ikke foregår i alkoholpåvirket tilstand.